

Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at skylle det permanent indlagte kateter. Dette skal kun gøres, hvis du mener, at det er nødvendigt for at gendanne flowet. Årsagen kan være pleuravæskens eller ascitesvæskens viskositet.

Information om skylning af kateteret

Du behøver ikke at skylle kateteret som en forebyggende foranstaltning. Suget i vakuumflaskerne forhindrer sædvanligvis, at kateteret tilstoppes. Det er fordi, at vakuummet opsuger eventuelle partikler, der måtte sidde fast i kateteret. Gør følgende, hvis kateteret alligevel bliver blokeret:

1. Overvej muligheden for, at der ikke er nogen væske.
2. Hvis du mener, at der er væske, og hvis der blev anvendt poser til dræningen, så forsøg først at bruge en vakuumbeholder til at komme af med partiklerne.
3. Hvis der ikke er noget flow i beholderen, kan du skylle kateteret med en steril saltvandsopløsning. Se instruktionerne herunder.


Kun læger, eller sygeplejersker på anvisning af en læge, må skylle kateteret med aseptisk teknik.

Hvis der ikke begynder at løbe væske ud efter skylningen, skal patienten røntgenfotograferes for at undersøge, hvad der forårsager det (lommedannelse eller mangel på væske).


Nødvendige materialer

Skylleslange (art.nr. 6020/2)
drainova® silikonehætte (art.nr. 9060)
Trevejshane
Sprøjte, 10-20 ml
NaCl 0,9 %
Alkoholbaseret desinficeringsmiddel og kompres
Drænesæt eller drænagepose/-beholder
Instruktioner


Instruktioner

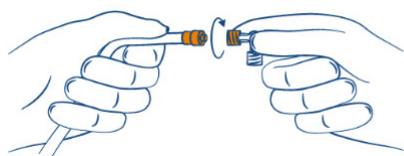


1 | Slut trevejshanen med sprøjten med NaCl 0,9 % til skylleslangen. Fyld derefter hele skylleslangen med 0,9 % NaCl for at fjerne luften.

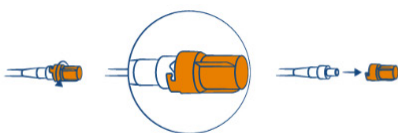


2 | Tag hættten af kateteret, og bortskaf den.

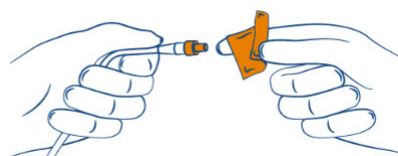


3 | Desinficér sikkerhedsventilen.

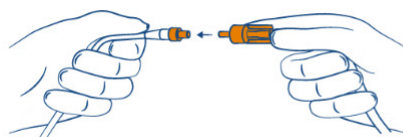


4 | Slut skylleslangen til sikkerhedsventilen på kateteret, og skyl med 0,9 % NaCl. Aspirér derefter væsken for at se, om den begynder at udtømmes.

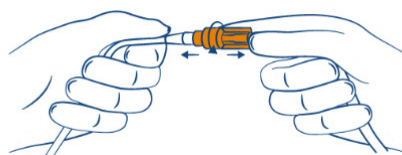

5 | Kobl skylleslangen med tilbehør fra kateterets sikkerhedsventil. Udtøm derefter væsken med et drænagesæt (eller drænagepose/-beholder) i henhold til instruktionerne.

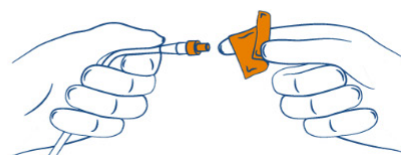

6 | Desinficér sikkerhedsventilen.

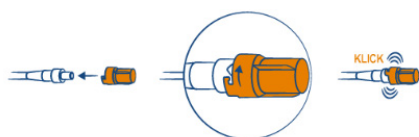

7 | Sæt en ny hætte på.